

HOW TO CLEAN A RESPIRATOR

Remove cartridges and filters.



Clean facepiece (excluding filters) by immersing in warm cleaning solution and scrub with soft brush until clean. Do not use cleaners containing lanolin or other oils.



Disinfect the facepiece by soaking in a solution of quaternary ammonia disinfectant or dilute sodium hypochlorite, or another suitable disinfectant.



Rinse in fresh warm water and air dry in a clean non-contaminated area.



Inspect the respirator components prior to reassembly. A respirator with any damaged must be repaired or discard.



Store the clean respirator away from contaminated areas when not in use.




Environmental
Health and Safety
Department



Contact us:
eh&s@utep.edu
915-747-7124

CÓMO LIMPIAR UN RESPIRADOR

1 Retire los cartuchos y filtros.

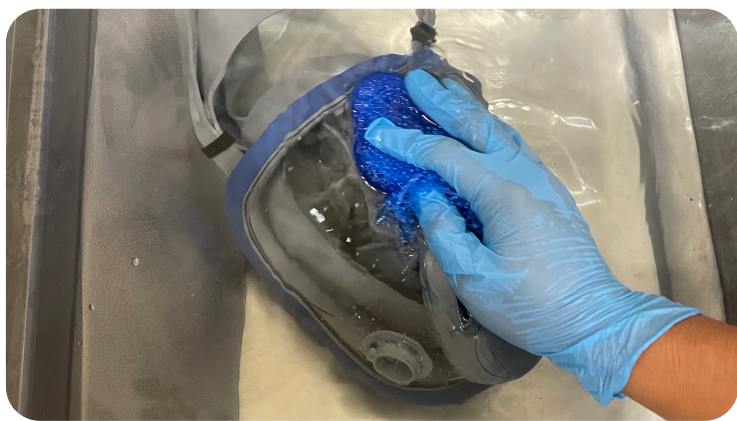

2 Limpie la pieza facial (excepto los filtros) sumergiéndola en una solución de limpieza tibia y frote con un cepillo suave hasta que quede limpia. No utilice limpiadores que contengan lanolina u otros aceites.

3 Desinfecte la pieza facial sumergiéndola en una solución de desinfectante de amoníaco cuaternario o hipoclorito de sodio diluido, u otro desinfectante adecuado.



4 Enjuague con agua tibia fresca y seque al aire en un área limpia no contaminada.

5 Inspeccione los componentes del respirador antes de volver a armarlos. Un respirador dañado debe repararse o desecharse. Almacen lejos de áreas contaminadas.



6 Guarde el respirador limpio lejos de áreas contaminadas cuando no esté en uso.

Environmental
Health and Safety
Department



Contact us:
eh&s@utep.edu
915-747-7124