

HOW TO WEAR FULL FACE MASKS PROPERLY

01.

Fully loosen all head straps. Bring respirator close to your face with one hand.



02.

While holding the respirator with one hand, pull the straps over your head.



03.

Tighten the bottom straps until you feel it is secured.



04.

Tighten the top straps until you achieve a secure fit.



Positive Pressure User Seal Check

05.

Place the palm of your hand over the exhalation valve cover and exhale gently, the mask should bulge slightly.



Negative Pressure User Seal Check

06.

Place the palms of your hands over the cartridges of the filters and inhale, it should collapse slightly.



07.

Wash your hands properly and immediately after you remove the respirator.



Face must be clean shaved at all times. Long hair should be pulled back on a ponytail.



Environmental Health
and Safety Department



Contact us:
eh&s@utep.edu
915-747-7124

CÓMO USAR UN RESPIRADOR DE CARA COMPLETA CORRECTAMENTE

01.

Afloje por completo todas las correas para la cabeza. Acerque el respirador a su cara con una mano.



02.

Mientras sostiene el respirador con una mano, pase las correas por encima de su cabeza.



03.

Apriete las correas de la parte de abajo hasta lograr un ajuste seguro.



04.

Apriete las correas superiores hasta lograr un ajuste seguro.



Verificación del sello de presión positiva

05.

Coloque la palma de su mano sobre la cubierta de la válvula de exhalación y exhale suavemente, la máscara debe inflarse ligeramente.



Verificación del sello de presión negativa

06.

Coloque las palmas de su mano sobre los cartuchos de los filtros e inhale, debe sentir una ligera succión.



07.

Lávese las manos correctamente e inmediatamente después de quitarse el respirador.



La cara debe estar bien afeitada en todo momento. El cabello largo debe recogerse en una cola de caballo.

